

# LAX VOX®

## LAX VOX® slang

De Lax Vox® slang is van origine een siliconen slang van het type Brevosil-ZI voor de voedings- en drankenindustrie, huishoudelijke apparatenbouw, chemische industrie, cosmetische industrie, laboratoria en meet- en regeltechniek.

Sinds 2012 wordt deze slang toegepast bij de zogenaamde Lax Vox® methode als oefenmethode om stemgeving te optimaliseren.

De slang is levensmiddelen geschikt volgens FDA CFR Par. 177.2600 / BGVV ( food keur ), is non toxisch, vochtbestendig en waterafstotend.

Drinkwater geschikt volgens KTW, DVGW 270. De slang is steriliseerbaar en stoombestendig tot + 135 °C. Herhaaldelijke sterilisatie met stoom en bestraling moeten voorkomen worden aangezien dit de eigenschappen van het materiaal kan beïnvloeden.

## Reinig de Lax Vox® slang voor gebruik

Bij productie van de slang wordt talkpoeder gebruikt om plakken van de slang tegen te gaan. Wij adviseren de slang voor gebruik te reinigen met heet water en eventueel (groene) zeep om de talkpoeder te verwijderen. Vervolgens **goed naspoelen** met schoon water.

## Opslag voorschriften en gebruik

- De slang gescheiden van andere PVC producten en nimmer in PVC verpakken of opslaan vanwege weekmakers in PVC. Deze tasten de slang aan. U kunt wel PE (polyethyleen verpakking) of karton gebruiken.
- Opslagtemperatuur onder 25 °C (niet onder -30 °C)
- Relatieve vochtigheid niet meer dan +70%
- Opslag in de buitenlucht is niet toegestaan.
- Bij langdurige opslag kan verspreid witte uitslag op het oppervlak optreden
- Slangen niet geknikt of platgedrukt opslaan. Meestal verdwijnen knikken weer bij het uitrollen of strekken.
- Onderliggende producten mogen door het gewicht van daarop liggende producten niet vervormen.



Dokwerkerstraat 3,  
2984 BJ Ridderkerk  
T: 0180 417344  
E: info@brevo.nl

